

# Korrektes Bekleben der Probenröhrchen


## FALSCH



1. 2. 3.

Barcode vom Gerät nicht lesbar, da

1. zu tief geklebt
2. quer geklebt
3. schräg geklebt

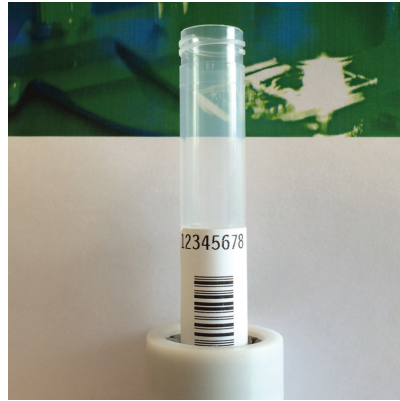


So sitzt das Röhrchen im Gerät, daher ist der Barcode NICHT lesbar

## RICHTIG



Barcode vom Gerät lesbar, da im oberen Bereich des Röhrchens längs geklebt wurde

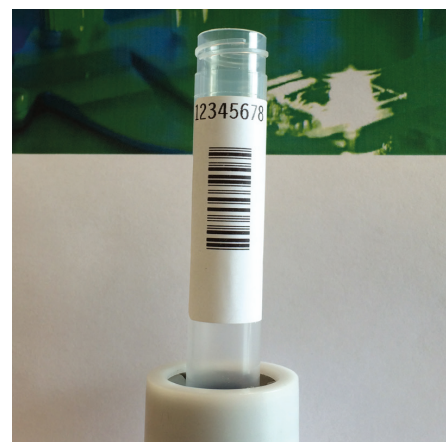

So sitzt das Röhrchen im Gerät und der Barcode ist lesbar

